



Vejledning

Medicinske gasser - Pinindeks ventil



VIGTIG

Ved montering af reduktionsventil på flaske, anvendes følgende procedure:

- Sørg for at have tørre og rene hænder, undgå brug af håndcreme
- Kontroller pinindeksventilen (2) for at sikre, at der ikke forefindes fremmedpartikler, olie eller fedt
- Placer dig bag flasken (1), som vist på illustrationen (åbningen skal vende væk fra dig - 200 bar)
- Åben pinindeks ventilen (2) langsomt og kortvarigt for at sikre mod urenheder
 - Den gamle ventil åbnes med flaskeventilnøglen (illustration)
 - Den nye ventil åbnes med hånden
- Efterse om pakningen på reduktionsventilen (3) er intakt
- Monter reduktionsventilen (3) på flasken (1)
- Vær sikker på, at flowreguleringshåndtaget (7) er lukket (off/O)
- Åben pinindeksventilen (2), manometeret (4) viser indholdet/trykket
- Udfør tæthedsprøve med lækspray
- Åben derefter for flowreguleringen (7) indtil man har det ønskede forbrugsflow (5)



NB:

Flasken må ikke løftes i ventilen - hold i stedet på selve flasken